

- 1** Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:




- 2** Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.

- 3** Experimente cada molde de almofada no nariz e escolha o menor tamanho de almofada que não fique obstruindo as laterais do nariz ou os olhos.



Mirage™ FX
NASAL MASK

www.cpaps.com.br

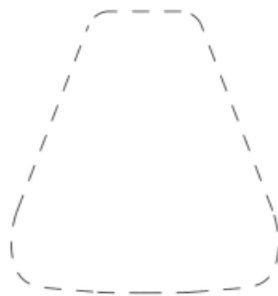

Tamanho Padrão (STD)

Altura: 5,0 cm
Largura: 4,8 cm



Tamanho Largo (Wide)

Altura: 4,5 cm
Largura: 5,6 cm